



SpeedyGel

Manuale utente
termometro infrarossi con
disinfettante mani
automatico

Nota: Non versare disinfettante per le mani nella testina di misurazione della temperatura e nel sensore di distanza. 2. Dopo aver caricato il disinfettante per le mani, può essere posizionato solo in posizione verticale.

1. SPECIFICHE

1. Precisione della misurazione della temperatura: precisione $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$ ($34^{\circ} \sim 45^{\circ}\text{C}$)*
2. **Modalità allarme:** allarme automatico anomalo, lampeggiante + suono di di di di
3. **Distanza di misurazione:** misurazione automatica 5 cm $\sim$ 10 cm
4. **Display:** display digitale
5. **Interfaccia di trasmissione:** interfaccia USB tipo C
6. **Capacità dispenser liquido:** 1000 ml
7. **Metodo di installazione:** fissato a parete, fissato con staffa mobile
8. **Temperatura di lavoro:** $10^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$ (temperatura consigliata $15^{\circ}\text{C} \sim 35^{\circ}\text{C}$)
9. **Intervallo di misurazione:** $0 \sim 50^{\circ}\text{C}$
10. **Tempo di risposta:** 500 ms
11. **Modalità standby:** 5 Sec standby durante il tempo non lavorativo, ciclo dinamico punto rosso
12. **Tensione in ingresso:** DC 5V 1500mA
13. **Dimensioni:** 119X133X279mm
14. **Tipo di liquido:** normale disinfettante per le mani, disinfettante per le mani usa e getta

*NOTA: Deve essere posizionato in un ambiente di lavoro per 30 minuti per iniziare a utilizzare)

2. SETUP

1. Standby: il punto rosso nella parte inferiore del display si illumina. (Fig. 1)
2. Batteria Scarica: la barra orizzontale si illumina al centro del display. (Fig. 2)
3. Temperatura normale: luci verdi lampeggianti e allarme 'Di'. (Fig. 3)



Fig. 1



Fig.2



Fig. 3

4. Temperatura anomala: luci rosse lampeggianti e allarme 'Di Di'. (Fig. 4)

5. Default:

'Lo': allarme bassissima temperatura, il disinfettante non viene erogato (Fig.5) 'HI': allarme altissima temperatura il disinfettante non viene erogato (Fig. 6)



Fig. 4



Fig. 5



Fig.6

3. ISTRUZIONI OPERATIVE

1. Misurazione della temperatura e lavaggio delle mani: mettere la mano nella parte inferiore del dispositivo (Figura 7), avvicinarsi e si sente un segnale acustico per misurare i dati di temperatura e spruzzare automaticamente il disinfettante per le mani.

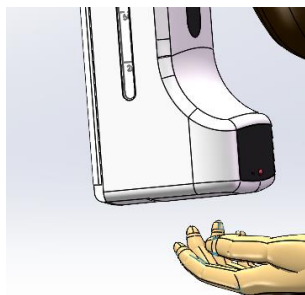


Fig.7

2. Cambio di modalità: premere il pulsante F / C sul lato destro del dispositivo come in (Figura 8).

(1) Premere una volta per cambiare l'unità di misura della temperatura, allo stesso tempo il display mostra C o F come (Figura 9, 10), C = Celsius, F = Fahrenheit.

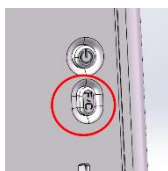


Fig.8



Fig.9



Fig.10

4. INSTALLAZIONE

1 Treppiede: nella parte inferiore del dispositivo è presente un foro filettato, che può essere collegato ad un treppiedi standard (Figura 11).

2 Parete: sono presenti due fori sul retro del dispositivo, da utilizzare per posizionarlo a parete.

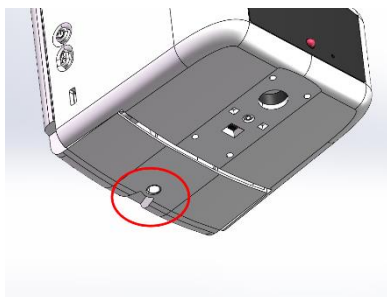


Fig.11

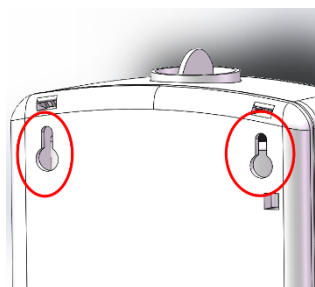


Fig.12

3 Accensione / spegnimento: premere il pulsante sul lato destro del dispositivo come mostrato nella Figura 13.

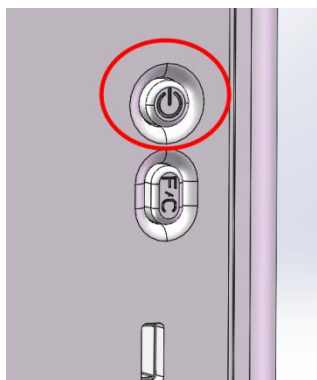


Fig.13